

Lees deze informatie nauwkeurig voordat u Replens de eerste keer gebruikt.

Replens®

Gezuiverd water Ph.Eur. VAGINALE GEL

BIJ VAGINALE DROOGHEID

Symptomatische verlichting bij

- VAGINALE ATROFIE & DROOGHEID
- JEUK
- IRRITATIE
- ONGEMAK

REPLENS

Replens is een langdurig werkende vaginale gel. Ingrediënten: Gezuiverd water Ph. Eur. 78.82, Polycarbophil, Minerale olie, Glycerine, Glyceride van gehydrogeneerde palmolie, Carbomeer 974P, Sorbinezuur, Natriumhydroxide.

Replens is een zachte witte gel voor intravaginaal gebruik.

Replens is verkrijgbaar in doos met 6 afzonderlijk gevulde wegwerp applicators à 5,9 g.

Replens® is een medisch hulpmiddel

HOE WERKT REPLENS?

Replens hecht zich aan de binnenzijde van de vagina waar het zorgt voor bevochtiging en comfort. De gel blijft enige dagen op de vaginawand achter terwijl het gezuiverde water uit Replens geabsorbeerd wordt. De pH van Replens komt overeen met die van een gezond vaginaal milieu.

WAT DOET REPLENS?

Replens geeft verlichting bij de symptomen van vaginale atrofie, droogheid, jeuk, irritatie en last tijdens of na het vrijen, o.a. bij vrouwen in en na de menopauze.

WANNEER GEBRUIKT U GEEN REPLENS?

Gebruik Replens niet tijdens of vlak na een zwangerschap. Niet geschikt voor kinderen. Niet gebruiken in geval van allergie voor een van de bestanddelen. Replens is niet zaaddodend en biedt daarom geen bescherming tegen zwangerschap.

WANNEER GEBRUIKT U REPLENS?

Eén keer per drie dagen inbrengen, bij voorkeur in de ochtend. Replens tast de bescherming van een condoom niet aan. Replens heeft geen effect op de beweeglijkheid of levensvatbaarheid van sperma en zal de kans op bevruchting niet beïnvloeden. Replens bevat geen hormonen en kan gebruikt worden in combinatie met (hormonale) medicatie. Enkele dagen nadat u Replens voor het eerst gebruikt heeft, kunt u een witte afscheiding zien, welke droog en korrelig kan zijn. Dit is normaal en het gevolg van de reinigende werking van Replens. De vagina is onder normale omstandigheden zelfreinigend, maar als deze al enige tijd droog is, hopen de afgestorven cellen zich op. Replens hecht zich nu aan deze cellen en spoelt ze weg. Bij herhaald gebruik van Replens wordt de hoeveelheid afscheiding geleidelijk aan minder tot het vaginale milieu weer genormaliseerd is.

Indien u enig onaangenaam effect opmerkt na het gebruik van Replens adviseren wij u contact op te nemen met een arts of apotheker.

HOE GEBRUIK IK REPLENS

Replens helpt bij het gezond houden van het vaginale milieu en is niet alleen bedoeld om te gebruiken bij het vrijen. Aanbevolen wordt om Replens één keer per drie dagen, bij voorkeur in de ochtend, in te brengen en niet alleen net voor het vrijen.

Replens wordt met de speciaal ontwikkelde applicator - heel hygiënisch - daar in de vagina aangebracht waar het nodig is.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN REPLENS MET WEGWERP APPLICATOR

Replens kan met de speciaal ontworpen applicator rechtstreeks in de vagina worden ingebracht. Verwijder de verpakking. NIET de applicator opendraaien.

1. Houd de applicator vast bij het dikke gedeelte. Schud de applicator als een thermometer om de inhoud naar het dunne uiteinde te brengen.



2. Draai de afsluiting open en verwijder deze.



3. U kunt de applicator het beste inbrengen wanneer u zit of ligt op uw rug met opgetrokken knieën. Breng de applicator voorzichtig zo ver als mogelijk in de vagina.



4. Druk stevig op het dikke gedeelte om de gel in te spuiten. Trek de applicator daarna terug en gooi deze weg in een afvalcontainer.

Waarschuwing: Iedere applicator is afzonderlijk verpakt. Gebruik dit product niet als de verpakking bij aankoop reeds geopend of gescheurd is. In ge- val van beschadiging kunt u de verpakking terugbrengen naar de winkel van uw aankoop.



BELANGRIJK:

Iedere applicator is afzonderlijk verpakt. Gebruik het product niet als de verpakking vóór gebruik geopend of verwijderd is.



Bewaren bij kamertemperatuur (onder 25° C)
Niet gebruiken na houdbaarheidsdatum (zie verpakking)

Vragen en antwoorden

V. Hebben veel vrouwen last van vaginale droogheid?

A. Vaginale droogheid is een zeer veel voorkomend probleem. Het doet zich voornamelijk gedurende en na de menopauze voor, maar kan ook optreden tijdens een periode van borstvoeding, bij medicijngebruik en bij vrouwen waar de baarmoeder is verwijderd. Ook tijdens het ouder worden treden klachten op als jeuk, irritatie en ongemak. Zij blijken het gevolg te zijn van een lange periode van droogheid.

V. Wat veroorzaakt vaginale droogheid, jeuk en ongemak?

A. Deze veelvoorkomende problemen worden veroorzaakt doordat er gebrek aan natuurlijke bevochtiging, welke afkomstig is vanuit de binnenzijde van de vagina. De hoeveelheid geproduceerd vocht is afhankelijk van het hormoon oestrogeen. Wanneer de hoeveelheid oestrogeen laag blijft, zoals na de menopauze, kan het hele gebied in en om de vagina droog worden, hetgeen leidt tot irritatie, jeuk en ongemak.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Lifestream Pharma BV.

Importeur/distributeur Nederland:
Lifestream Pharma BV
Goomeer 3-25, 1411 DC Naarden
www.replens.nl



Lil' Drug Store Products, Inc.
1201 Continental Place NE
Cedar Rapids, IA 52402, USA



P.Q.S. Medical B.V.
P.O. Box 36, NL-1180AA
Amstelveen, The Netherlands

Made in the United Kingdom © 2007

Replens® is een geregistreerd handelsmerk van Lil' Drug Store Products, Inc.

40505400003
83008I-NL-0807

CE
0120