

Sienna™ COVID-19 Antigeen Sneltestcassette (Neusuitstrijkje)


Opmerking: Elke test kan slechts één keer worden gebruikt. Test is voor eenmalig gebruik.

Snelle Referentiegids


MONSTERVERZAMELING

*Voor het verzamelen van het neusuitstrijkje, dient u uw neus te snuiten.


1 Steek de volledige tip van het wattenstaafje ongeveer 1,5 tot 2,5 cm in uw neusgat (3/5 tot 1 inch).

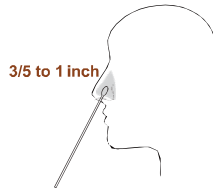


2 Draai het wattenstaafje minstens 5 keer ineem cirkelvormig pad tegen de neuswand. Doe dit gedurende 15 seconden om voldoende monster te verzamelen.

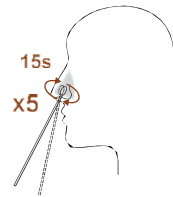


3 Herhaal het proces voor het andere neusgat met hetzelfde wattenstaafje. Zorg ervoor dat u eventuele neusdrainage op het wattenstaafje verzamelt.

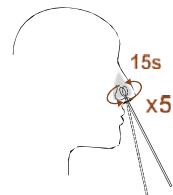


TEST PROCEDURE

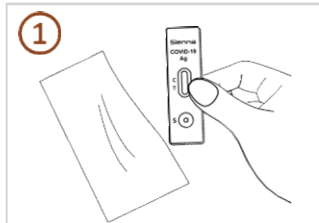


1 Haal de testcassette uit het verzegelde foliezakje en gebruik deze binnen één uur.

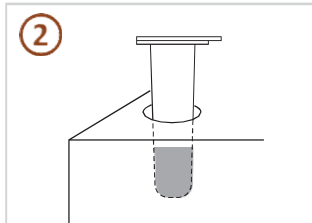


2 Steek het voorgevulde bufferflesje in het gat (zie perforatie) van het doosje van de test.

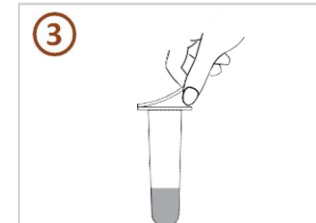


3 Scheur de aluminiumfolie van het bufferflesje.

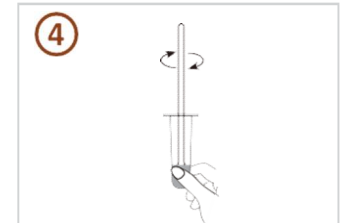


4 Plaats het wattenstaafje in het bufferflesje. Draai het wattenstaafje ongeveer 10 seconden terwijl u de kop tegen de binnenkant van het bufferflesje drukt.

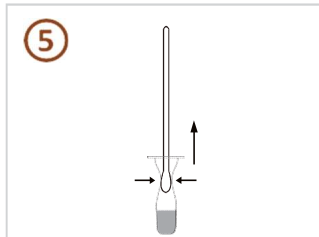


5 Wanneer u het wattenstaafje verwijderd, drukt u de wattenstaafkop stevig tegen de binnenkant van het bufferflesje. Dit om zoveel mogelijk vloeistof uit de tip van het wattenstaafje te verwijderen.

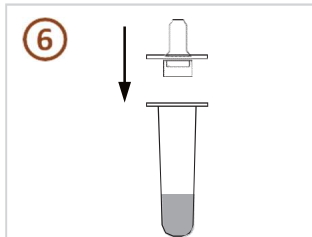


6 Plaats de druppelaar bovenop het bufferflesje.

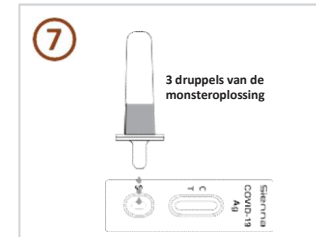

7 Houd de druppelflesje verticaal en voeg 3 druppels van de monsteroplossing (ca.80µL) toe aan de testopening en start vervolgens de timer.

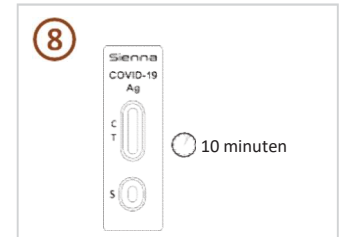


8 Lees het resultaat af na 10 minuten. Na meer dan 20 minuten de test niet meer aflezen of beoordelen.

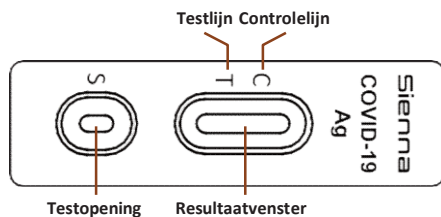

Sneltest cassette

Positief

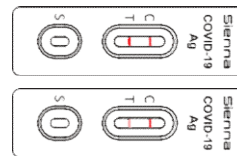


Zowel in het controlelijngedebied (C) als in het testlijngedebied (T) is een lijn zichtbaar. De lijn bij T hoeft niet even duidelijk te zijn als de lijn bij C.

Negatief



Er verschijnt één gekleurde lijn in het controlelijngedebied (C). Er verschijnt geen gekleurde lijn in het testlijngedebied (T).

Ongeldig

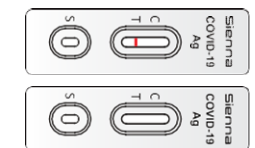

De controlelijn verschijnt niet. Bekijk deze procedure en de handleiding nogmaals zorgvuldig en herhaal de test met een nieuwe test.